

ООО «СКБ ТЕЛСИ»

Выносная кнопка вызова
MP-422W2

Паспорт

Версия 01/24

Москва
2024

1. Назначение

Выносная проводная кнопка вызова (далее кнопка вызова) МР-422W2 предназначена для использования как дополнительная. Указанная кнопка подключается к цифровой радиокнопке МР-411W2 проводом и служит для подачи вызова персоналом лежачими пациентами через цифровую радиокнопку вызова по радиоканалу на радиоконтроллер со встроенной лампой МР-211W4 или радиоприемник МР-831W4. Изделие предназначено для работы в составе оборудования системы вызова персонала «HostCall-CMP».

2. Общие указания

Раздел 12 заполняется предприятием изготовителем, раздел 13 – организацией-продавцом.

3. Технические характеристики

Напряжение на кнопке, В	5 ±10%
Ток потребления, мА, не более	1
Диапазон рабочих температур, °С	от +5 до +45
Конструктив	настенное накладное крепление
Габаритные размеры, мм	80x108x34
Вес, г	125
Срок службы, не менее	5 лет

4. Внешний вид и описание

На рис.1 приведен внешний вид кнопки вызова.

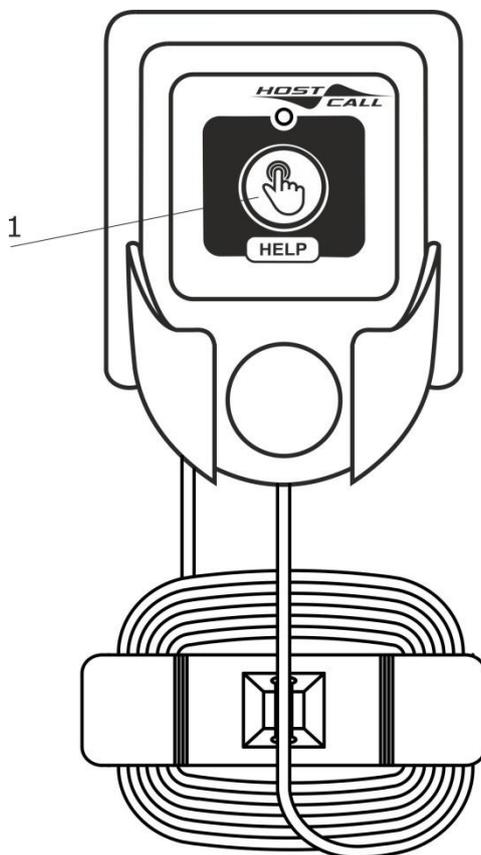


Рисунок 1. Внешний вид кнопки вызова МР-422W2

Кнопка вызова выполнена в пластиковом корпусе белого цвета и рассчитана на накладное крепление. На передней стороне корпуса находится мембранная клавиша с пиктограммой  (рис.1, поз.1).

Конструктивно кнопка вызова состоит из крышки с установленной платой с подключенным штатно соединительным проводом, основанием и держателя, закрепляемого на стене. Кнопка вызова соединяется с держателем гибким проводом 2 м. Для регулирования длины гибкого провода используется держатель-органайзер кабеля, входящий в комплект поставки, на который наматываются излишки провода.

Кнопка вызова подключается к цифровой радиокнопке вызова МР-411W2.

Питание кнопки вызова осуществляется от цифровой радиокнопки вызова MP-411W2.

5. Монтаж

Монтаж кнопки вызова осуществляется в следующем порядке:

1. Подключить соединительный провод кнопки вызова к клеммам на цифровой радиокнопке вызова MP-411W2 без соблюдения полярности.
2. Закрепить держатель на стене с помощью саморезов.
3. Убедиться в работоспособности (см. п.6).
4. Закрепить держатель-органайзер кабеля на стене с помощью клеящего слоя или саморезов.

6. Порядок работы

Вызов осуществляется нажатием мембранной клавиши, расположенной на передней стороне корпуса кнопки вызова. При успешной подаче вызова светодиодный индикатор на цифровой радиокнопке вызова MP-411W2, к которой подключена кнопка вызова MP-422W2, однократно мигнет красным цветом и прозвучит звуковой сигнал. Сброс вызова осуществляется с помощью радиокнопки сброса MP-414W2.

7. Комплект поставки

В состав комплекта поставки входят:

- | | |
|-------------------------------|-------|
| - кнопка вызова MP-422W2 | 1 шт. |
| - держатель-органайзер кабеля | 1 шт. |
| - паспорт | 1 шт. |
| - упаковка | 1 шт. |

8. Условия установки и эксплуатации

Кнопка вызова MP-422W2 предназначена для эксплуатации в круглосуточном режиме при температуре воздуха от +5° до +45°С и влажности не более 80%.

После хранения изделия в холодном помещении или транспортирования в зимнее время, перед включением рекомендуется выдержать распакованное изделие 3 часа при комнатной температуре. Оберегайте изделие от попадания влаги, ударов, вибрации, не размещайте вблизи нагревательных приборов и в местах подверженных попаданию прямых солнечных лучей.

Изделие должно устанавливаться в сухих, отапливаемых помещениях.

Установка должна производиться силами специализированных монтажных организаций.

Срок службы изделия не менее 5 лет.

9. Правила хранения

Изделие должно храниться в штатной упаковке в помещении при температуре от +5°С до +45°С и относительной влажности до 80%.

10. Транспортирование

Изделие в упакованном виде может транспортироваться автомобильным, железнодорожным и воздушным (в отапливаемом отсеке) транспортом.

11. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 5 лет со дня продажи. Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно производить устранение дефектов, произошедших по вине Изготовителя.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в название и/или конструкцию изделия, не ухудшая при этом функциональные характеристики изделия.

В случае отказа в работе изделия в период гарантийного срока по вине Изготовителя, необходимо составить технически обоснованный акт об отказе и вместе с изделием отправить в адрес изготовителя для анализа, принятия мер в производстве и ремонта изделия. Срок ремонта в случае отсутствия указанного акта увеличивается на время диагностики отказа.

Изготовитель не несет ответственности по обязательствам торговых организаций и не обеспечивает доставку отказавшего изделия.

Адрес предприятия, осуществляющего гарантийный и послегарантийный ремонт:

117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.25А, строение 1, офис № 112Г,

телефон: (495) 120-48-88, e-mail: info@telsi.ru, www.telsi.ru, ООО «СКБ ТЕЛСИ».

12. Свидетельство о приемке

Кнопка вызова МР-422W2 соответствует действующим на предприятии-изготовителе техническим условиям, удовлетворяет требованиям системы качества и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска _____

13. Сведения о продаже

Дата продажи _____

Отметка продавца _____

ООО «СКБ ТЕЛСИ»
Телефон (495)120-48-88, info@telsi.ru, www.telsi.ru